

powerone)))

Energie für's Leben



high level hearing




[www.powerone-batteries.de](http://www.powerone-batteries.de)

# power one – bewährt zuverlässig und leistungsstark

power one ist eine Premium-Hörgerätebatterie –  
Made in Germany

- Sie zeichnet sich durch eine lange Laufzeit aus – auch bei Verwendung in digitalen Hörgeräten
- Sie ist zuverlässig und sicher – selbst bei extremen Umweltbedingungen wie starker Luftfeuchtigkeit
- Sie sorgt jederzeit für optimale Ausnutzung der Verstärkerleistung und brillante Klangqualität
- Sie unterliegt strengsten Qualitätskontrollen
- Sie bietet eine Verpackung, die praktisch, bequem und einfach in der Handhabung ist

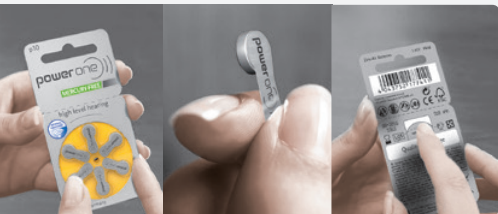

# **power one** – einfach, bequem und praktisch

---

## **safety comfort pack™**

Besonders bequem und sicher: Durch die praktische Drehscheibe können Zellen einfach entnommen und genauso einfach auch wieder eingesetzt werden. Zwei Lagen Karton sorgen dafür, dass keine Zelle herausfallen kann.

## **comfort tab**

Mit dem extra langen Abkleber lässt sich die Zelle bequem in das Hörgerät einsetzen.

## **quality seal**

Das Qualitätssiegel garantiert, dass die Verpackung noch nicht geöffnet wurde.

---

# power one MERCURY-FREE – nachhaltig und umweltgerecht

Mit der power one MERCURY-FREE entscheiden Sie sich für ein ökologisches Produkt

- Umweltfreundliche quecksilberfreie Technologie
- Umweltschonender Materialeinsatz und fast vollständige recycelbare Verpackungsmaterialien
- Umweltgerechte Produktion nach zertifiziertem Energiemanagementsystem ISO 50001

**Hohe Anforderungen der Wireless-Technologie**

Ihr modernes Hörgerät hat viele anspruchsvolle Funktionen, die Wireless-Technologie nutzen und dadurch einen höheren Strombedarf haben.



## power one – wireless approved



Mit den quecksilberfreien Hörgerätestarterbatterien wireless approved hat **power one** leistungsstarke Batterien entwickelt, die speziell diese Anforderungen der neuen Hörgeräte-Generation erfüllen.

### Für extreme Ansprüche

Die quecksilberfreie IMPLANT *plus* p675 MERCURY-FREE für Implantate ist so belastbar, dass sie eine besonders hohe Leistung unter extremen High-Power Bedingungen abgeben kann. Damit werden alle Anforderungen anspruchsvoller Prozessoren erfüllt und eine maximale Laufzeit sichergestellt.



## **power one –** häufig gestellte Fragen

---

### **Wie wird power one gelagert?**

Lagern Sie die **power one** Hörgerätebatterien am besten bei einer Raumtemperatur zwischen 20 und 25 °C. Hitze kann die Laufzeit verkürzen und feuchte Umgebung ist nicht zur Lagerung geeignet.

### **Warum haben Zink-Luft Hörgerätebatterien einen Abkleber?**

Hörgerätebatterien nutzen die Luft als Energiequelle. Der Abkleber versiegelt die Luftlöcher der Batterie. Nachdem der Abkleber entfernt wird, ist die Hörgerätebatterie aktiviert.

### **Wie entsorge ich die verbrauchte power one Batterie?**

Wie alle anderen Batterien dürfen Hörgerätebatterien niemals über den Hausmüll oder durch Verbrennen entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie die Batterie umweltgerecht bei Sammelstellen.

---

## Wie lang ist die Laufzeit von power one?

Die Laufzeit der Hörgerätebatterie ist abhängig von der Nutzungsdauer pro Tag, der Lautverstärkung und dem eingesetzten Hörgerätetyp.



## Was beeinflusst die Lebensdauer und Laufzeit meiner Hörgerätebatterie?

- Umwelteinflüsse (Luftfeuchtigkeit, Temperatur)
- Die Hörgewohnheiten haben sich gewandelt (längere Nutzungszeit pro Tag, höherer Geräuschpegel, neue Eigenschaften der Hörgeräte)
- Das Hörgerät war länger als üblich in Gebrauch
- Das Hörgerät ist neu, Typ oder Marke des Hörgeräts haben sich geändert
- Moderne Hörgeräte haben zusätzliche Eigenschaften (z.B. Streaming), die mehr Energie benötigen

# power one – Qualität für alle Anforderungen

**power one Hörgeräte-Energie bedeutet für Sie  
Sicherheit**

durch geprüfte Qualität mit strengsten  
Qualitätskontrollen.

**Einfaches Handling**

durch extra lange Abkleber und praktische  
Verpackung.

**Zuverlässigkeit unter allen Einsatzbedingungen**

durch hochwertigste Materialien, robustes  
Design und ESP-Gehäusebeschichtung.

*power one produziert in der weltweit größten und  
modernsten Produktionsstätte für Hörgerätebatterien.*





## Qualität für reinsten Klang

durch konstant hohe Spannungslage und innovative Kathodentechnologie.

## Leistung und Langlebigkeit

durch hohe Kapazität – mit der bewährten **power one** Performance.

## Vielfalt

durch die Möglichkeit der individuellen Auswahl der geeigneten Hörgerätebatterie innerhalb des **power one** Komplettsortiments.



powerone)))



Weitere Informationen zu  
power one Hörgerätebatterien  
erhalten Sie im Internet  
[www.powerone-batteries.de](http://www.powerone-batteries.de)



power one  
App

You Tube

