

JAP

power one 675charger

納品物

- **power one 675charger** 充電器 1台
- 充電器 / 電源を接続する接続ケーブル 1本
- USBポート搭載の接続ケーブル用電源アダプター 1台
- 4種類の国際接続対応の電源アダプター用プラグアタッチメント 1セット

取扱説明書

お客様各位

このたびは**power one 675charger**をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、再充電式補聴器電池 **power one p675 ACCU plus**向けの安全な最新型充電システムです。本機器を安全にお使いいただくために、以下の取扱説明書を良くお読みください。

1. 本製品について

power one 675chargerは、1個または2個の再充電式補聴器用電池 **power one p675 ACCU plus**を充電するための製品です。本機器は、**power one p675 ACCU plus**を5時間以内で充電します(完全に放電した蓄電池 / 一部充電状態の蓄電池の場合は、安全のために、またセルの耐久性を向上させるために、最初に自動放電されます / リフレッシュ保護)。

power one 675chargerには、**power one ACCU plus**ブランドの再充電式電池以外はご使用にならないでください。

2. 使い方

包装を開け、納品物がすべて揃っているかご確認ください。

充電の際は納品物の接続ケーブルを取り出し、希望の長さまで引っ張り(両端を同時に引き上げてください!)、同軸コネクタを**power one 675charger**の対応する接続口に接続してください。接続口は充電器の平らな背面にあります。この状態で、接続ケーブルのUSBコネクタを適当な電源に接続します。納品物の電源アダプターを使って、USBコネクタをコンセントに接続することができます。電源アダプターのプラグアタッチメント(アタッチメントは全部で4種類)は変換式で、国や地域に応じて選ぶことができます。

またUSBコネクタを使って、充電器をコンピュータ機器やノートパソコンのUSBポートに直接接続して作動させることも可能です。さらに、USBコネクタを自動車のシガレットライターまたは12ボルトソケット用のアダプターに接続して充電することもできます(アダプターは納品物に同梱されていません)。

これで、**power one 675charger**が使用できる状態になり、ニッケル水素補聴器電池 **power one p675 ACCU plus**の充電にご利用いただけます。充電を行うために、充電器のシルバーカバーを丸側の方向にずらします。

1個または2個のニッケル水素補聴器電池 **power one p675 ACCU plus**を専用の電池ケースにプラス (+) 側 (ボタン電池の平らな方) を下にして入れてください。ボタン電池を挿入する際は、極性が正しいことを確認してください。極性が間違っていたり、ボタン電池が故障していると、非常に短い点滅信号 (0.1秒点灯し、0.1秒消える) が表示されます。この場合は、充電が行われていないことを示しています。シルバーカバーを再び閉じてください。カバーが閉じていないと、電池を充電することができません。ニッケル水素補聴器電池の充電プロセスは緑色の点滅信号で表示されます。

power one 675chargerは、挿入されているニッケル水素充電電池の充電状態を自動的にチェックします。補聴器内で充電したセルは5時間以内で完全充電されます。充電が完了すると、緑色の継続信号が点灯します。これで、充電された電池を取り出し、補聴器を作動させることができます。

3. ニッケル水素蓄電池のお取り扱いについて

蓄電池の接触面および機器内の接触面は清潔に保ってください。性能を最大限発揮し、末長くお使いいただくために、原則的に電池の過放電やショートは避けてください。保管期間が長かった場合は、何回か充電/放電を繰り返していただくと、容量が一杯になります。

図 (左側から)

1. **power one 675charger** 充電器
2. USB接続ケーブル / 同軸コネクタ
3. 変換式プラグアタッチメント搭載の電源アダプター
4. 専用のニッケル水素補聴器電池 **power one ACCU plus** (納品物には同梱されていません)